

MÁSCARA DESCARTÁVEL COM PREGAS E FAIXAS DE AMARRAÇÃO

O QUE VOCÊ PRECISA SABER E FAZER PARA PRODUZIR MÁSCARAS PARA CONTINGÊNCIA DO COVID 19.

PARA AUXILIAR NA FABRICAÇÃO, ELABORAMOS ALGUMAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E DE PREVENÇÃO:

- ✓ Colaboração x Prevenção
- ✓ Como prevenir: higiene e saúde
- ✓ Fabricação: modelagem, corte, confecção da máscara e embalagem

A sua colaboração e seu trabalho vão fazer a diferença para aqueles profissionais que estão na linha de frente, para isso é importante que siga as orientações desse manual a fim de garantirmos a prevenção contra o coronavírus (COVID-19). Contamos com vocês.

Todas as informações contidas nesta ficha técnica são decorrentes das ações emergenciais de contingência ao vírus da COVID-19, baseadas nas orientações vigentes, flexibilização de normas técnicas e aprovação prévia das instituições que estão recebendo a doação dos EPIs. O Instituto Lojas Renner não se responsabiliza pelo não cumprimento das normas oficiais. Em caso de dúvidas ou novos cenários, seguir as orientações da Anvisa.



HIGIENIZAÇÃO AMBIENTE/EQUIPAMENTOS



Ambiente deve ser amplo.



Manter janelas abertas para circulação de ar.



Limpar mesas, cadeiras, máquinas, tesouras, pinças e bancadas frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.

Eliminar sobras de fios dos produtos evitando a contaminação dos materiais.



Limpar frequentemente maçanetas e espaços comuns com água sanitária ou álcool 70%.



O piso deve ser limpo frequentemente com água sanitária diluída em água. Os banheiros utilizados pelos funcionários devem ser higienizados frequentemente e dispor de sabonete líquido, papel higiênico e papel toalha.



COMO PREVENIR?

CUIDADOS COM OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA PRODUÇÃO.



Todos deverão ser previamente entrevistados por profissional da saúde capacitado (enfermeiro ou médico) com a finalidade de evitar que trabalhadores que tiveram contato com pessoas com suspeita ou comprovação de exame positivo para o COVID 19 manuseiem o material a ser confeccionado. Além do mais, o profissional da saúde deverá verificar se o funcionário não possui sintomas de infecção por COVID 19.



O Distanciamento físico deve ser mantido respeitando a recomendação de 2 metros de distância entre um funcionário e outro. Todos deverão ser orientados para comunicarem seu supervisor, caso venham a ter contato com paciente suspeito de COVID 19 e afastados imediatamente. Os trabalhadores deverão trocar de calçados e roupas antes do início da jornada de trabalho. Não devem usar no ambiente de trabalho, a mesma roupa e calçados com os quais se deslocaram até o local de trabalho. Sendo estes, exclusivos para uso neste ambiente.



Deverá ser verificada a temperatura dos funcionários no início e final do turno de trabalho. Se a temperatura for superior a 36,5, deverá ser realizada a relação com outros sintomas do COVID 19 por profissional da Saúde.



A lavagem das mãos e antebraços deverá ser realizada com sabonete líquido por um minuto antes do início da jornada de trabalho, abrangendo todas as partes das mãos e incluindo as regiões interdigitais.



COMO PREVENIR?



Os trabalhadores deverão usar máscara e gorro, utilizando os mesmos por no máximo 12 horas desde que estejam íntegros, limpos e secos, conforme recomendações da Anvisa.



Deverá ser disponibilizado álcool gel 70% nas bancadas de trabalho e os funcionários deverão ser estimulados a higienizar as mãos a cada 30 minutos. A higiene das mãos com álcool gel deve ocorrer sempre imediatamente ao início do manuseio das peças a serem confeccionadas, observando inclusive, saídas da área de trabalho para alimentação, lanches, beber água e uso de banheiro.



Os funcionários devem aderir as práticas de etiqueta respiratória preconizadas pelo Ministério da Saúde e devem manter unhas curtas e sem esmalte; retirar adornos como pulseiras e anéis.

Dúvidas a respeito da doença, como se prevenir e outras orientações técnicas acesse os sites abaixo

<https://www.saude.gov.br/>

<https://coronavirus.saude.gov.br/>

<http://portal.anvisa.gov.br/>




INSTITUTO
LOJAS
RENNER

DESCRIÇÃO DO MODELO:	Máscara de proteção c/pregas e faixas p/ amarração	TAM:	Único
COMPOSIÇÃO DO TECIDO:	100% polipropileno	ARAME DE AJUSTE:	Haste interna para ajuste no nariz – arame revestido 7 cm (conforme exemplo na foto)
GRAMATURA DO TECIDO:	40 gr/m2	LINHA GALONEIRA ou RETA:	Linha 120 (algodão ou mista) /Looper: fio de poliéster (galoneira)
NOME DO TECIDO:	Não tecido – cód SSMMS - BFE>=95%		

O tecido deve ser fornecido por fabricante especializado em materiais hospitalares e pode variar de acordo com a aplicação, podendo ser impermeável ou não.

DESENHO TÉCNICO

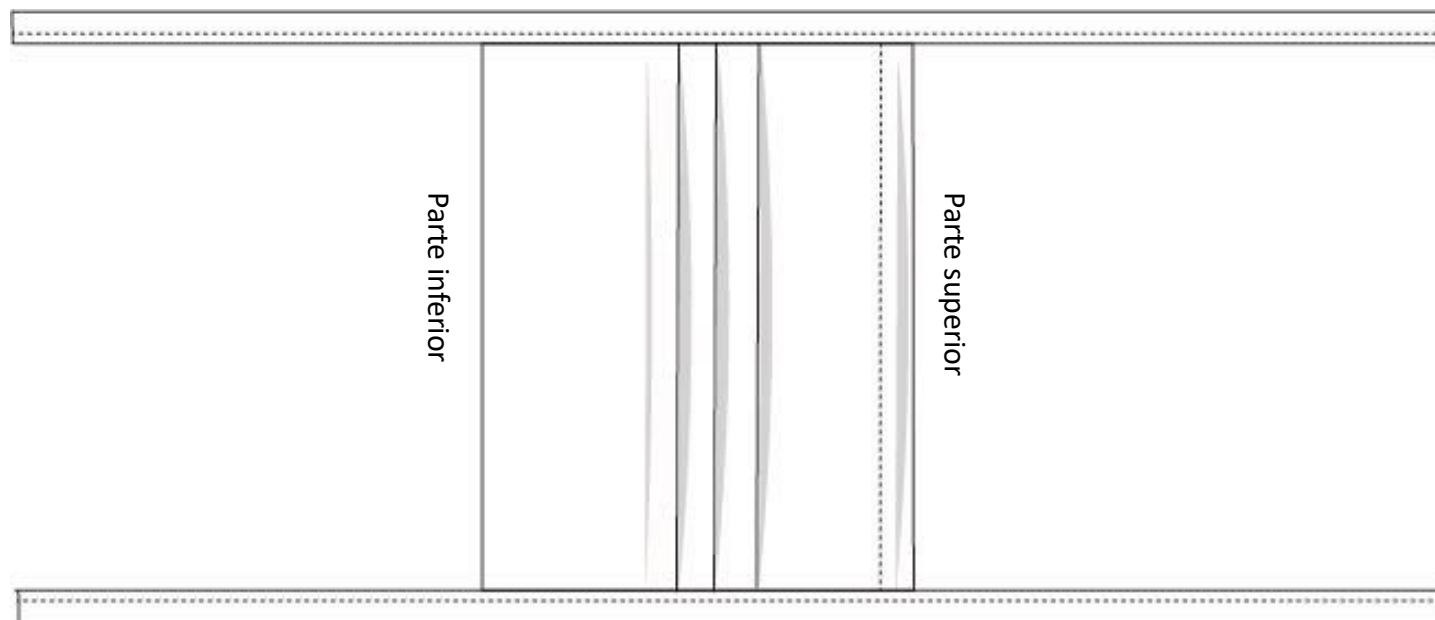


Antes de iniciar a produção, atentar para as orientações de higiene e saúde contidas nas primeiras páginas deste material

Material atualizado
07/04/2020



INSTITUTO
LOJAS
RENNER

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

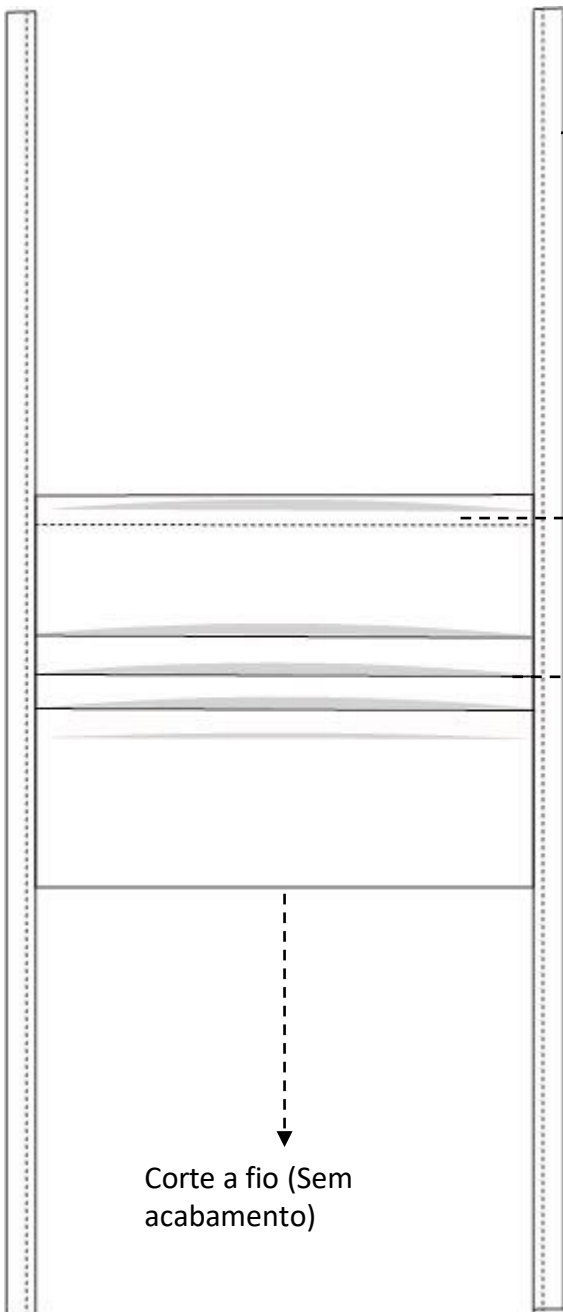

Aplicar faixa (viés/debrum) de 2cm, sem dobra ficando pronto com 1cm.
Pode ser aplicado na galoneira ou costura reta com aparelho.
Deixar sobras de 40 cm de cada lado para amarração.
Não precisa fazer arremate.

Bainha de 1cm para colocação de arame de 7cm.
Colocar haste antes de aplicar faixa na lateral

3 pregas com 1cm de profundidade cada.

Corte a fio (Sem acabamento)



Material atualizado
07/04/2020



INSTITUTO
LOJAS
RENNER

AMOSTRA

FRENTE



LADO



COSTAS



Fotos ilustrativas, não foram feitas em confecção com reta e galoneira.




INSTITUTO
LOJAS
RENNER

OBSERVAÇÕES:

Medir centro da frente abrindo as pregas.

Primeira prega está posicionada a 3,5cm da base de cima (peça pronta).

MEDIDAS/COMO MEDIR

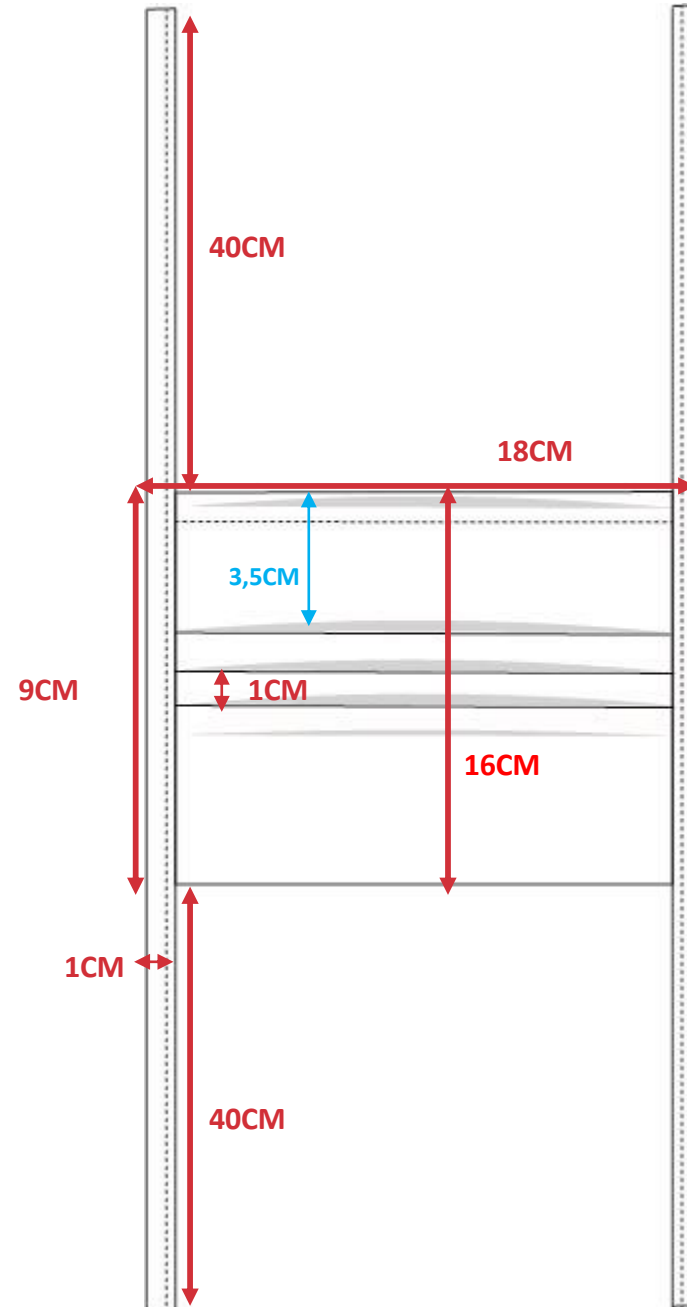



INSTITUTO
LOJAS
RENNER

Molde tamanho único.

Link abaixo disponível na nuvem em formato para cad Audaces e DXF.


Qtde de partes:

Máscara 1x

Faixa lateral 2x

https://renner.sharepoint.com/:f:/s/dtp/Es9id_rnFhVCt8FN4trtR7ABTUePTngT7kq74hgHKrkaug?e=XXTyK8

MOLDE

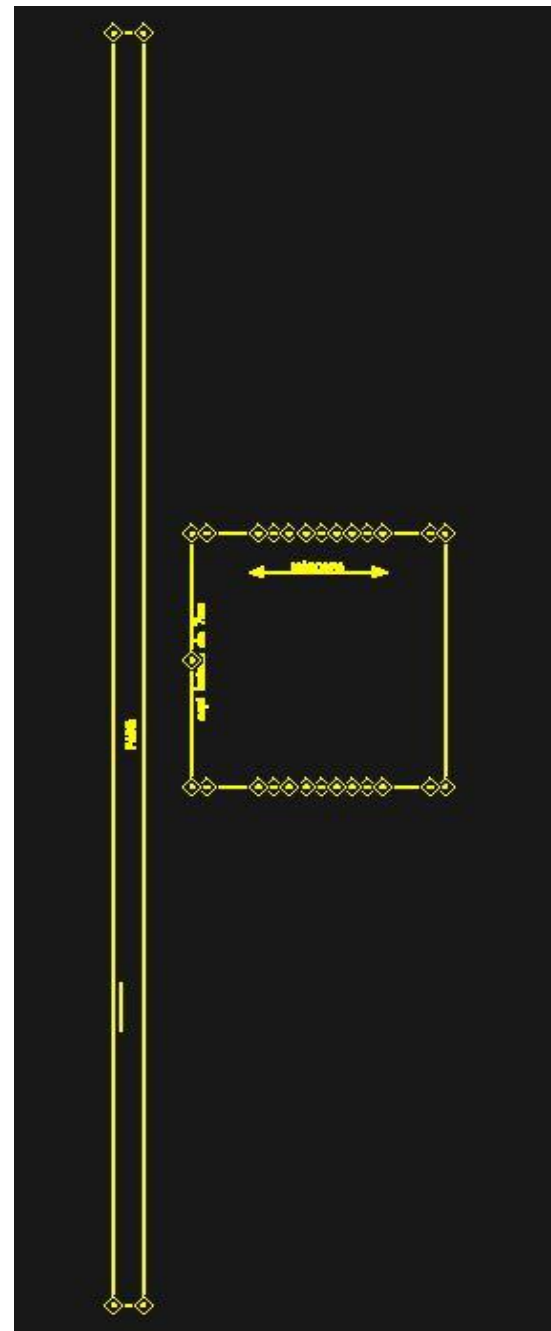



INSTITUTO
LOJAS
RENNER

ENCAIXE

Por se tratar de **não tecido**, o encaixe pode ser feito no **modo livre**, sem pé.

De acordo com o lote da matéria prima, podem haver alterações de largura e especificações do material, interferindo no consumo.

Neste material disponibilizamos 3 larguras, 140 cm, 160 cm e 200 cm. Se for confeccionar avental com o mesmo material poderá ser realizado risco com os dois modelos, assim a máscara poderá usar áreas de desperdício do encaixe.

Neste estudo não estão previstas perdas de enfiesto. Neste caso fica a cargo de cada fornecedor aplicar o % de acordo com seu processo de corte.


A auréola pode ser utilizada no risco, sem necessidade de descontar a margem.

MÁSCARA COM PREGAS e FAIXA DE AMARRAÇÃO - CONSUMO DE TECIDO				
Largura	Consumo unitário mt	Eficiência do encaixe	Metragem	Volume de Máscaras
1,40	0,0515	91,80%	100	1.942
1,60	0,0458	90,41%	100	2.183
2,00	0,0368	89,94%	150	4.076




INSTITUTO
LOJAS
RENNER

Largura 1,40 m

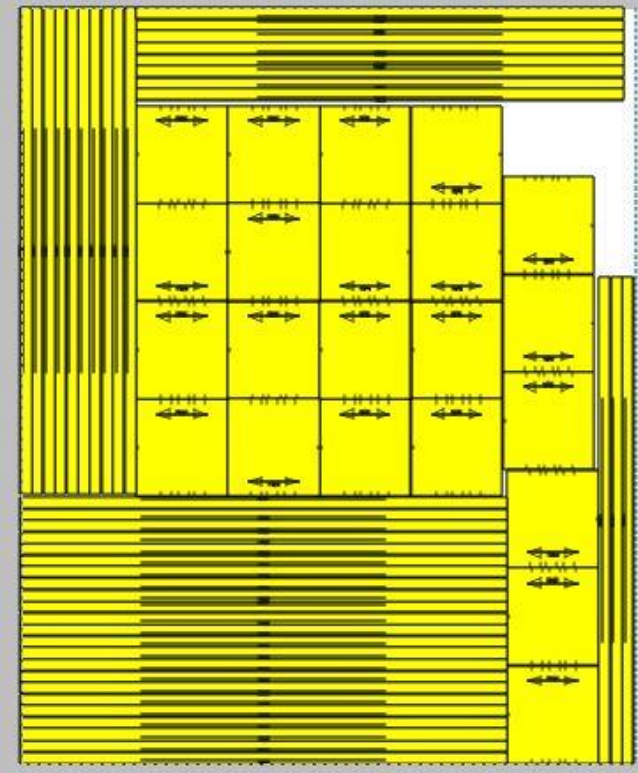


ENCAIXE

Largura 1,60 m

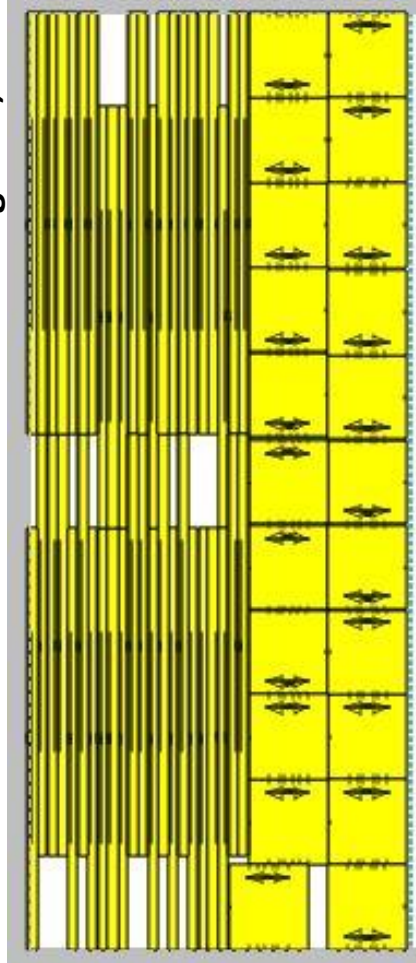

Largura 2m

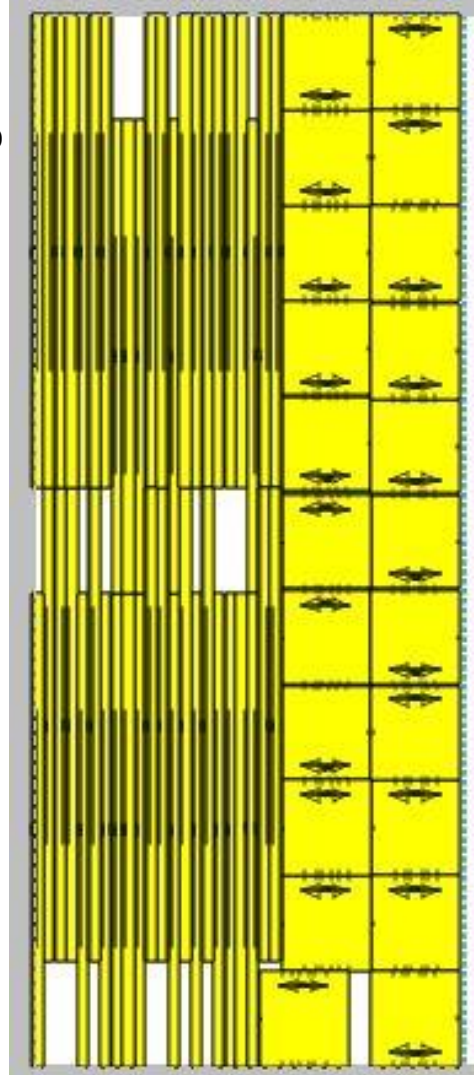




INSTITUTO
LOJAS
RENNER

SEQUÊNCIA OPERACIONAL

Máscara com pregas e faixa para amarração		
	Operações	Máquinas
1	Fazer bainha de 1 cm no lado maior do molde (Túnel superior)	Costura Reta
2	Introduzir arame de 7 cm na bainha	Manual
3	Fazer 3 pregas de cada lado de acordo com os piques, de cima para baixo.	Costura Reta
4	Pregar faixas (viés/debrum) de 1cm com aparelho sem dobra (simples), deixando 40 cm de sobra. Não precisa arrematar	Costura Reta ou galoneira
5	Fazer limpeza de fios da peça	Manual/tesoura
6	Revisar, empilhando 25 máscaras	Manual
7	Embalar 50 unidades por saco plástico e fechar com fita adesiva (empilhadas lado a lado)	Manual
8	Fazer pack de acordo com o tamanho de caixa disponível	Manual
9	Lacrar a caixa e expedir o pedido.	Manual



INSTITUTO
LOJAS
RENNER

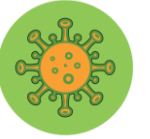

COM
COLABORAÇÃO
A GENTE
VAI MAIS LONGE
#SEGUIMOSJUNTOS